

CE



Ortéra palce ruky **035**



HANDICAP

Ortéza palce ruky 035

URČENÝ ÚČEL

Ortéza palce ruky 035 je určena k fixaci palce a palcové strany zápěstí při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti palce.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udrží semirigidní fixaci v oblasti metakarpofalangeálního kloubu palce a I. paprsku palce přiložením a dotažením rigidní tvarovatelné hliníkové dlahy radiálně.

INDIKACE

- Lehké distorze v oblasti palce.
- Doléčení po sejmutí rigidní fixace u pacientů se zlomeninou palce.
- Rhizartróza, artritida či tendinitida.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyester (PES) 100%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek  je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Datum poslední revize: 1.2. 2020

POKYNY K NASAZENÍ


První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

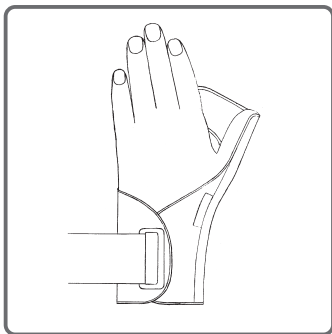

1

Rozepněte všechny suché zipy a přiložte dlahu na hřbet palce. Hliníková dlahu může být tvarována dle potřeby odborným personálem.

Přichyťte pomocný suchý zip v oblasti zápěstí.

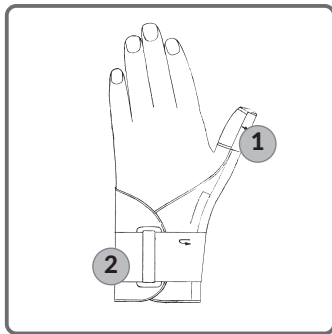

2

Dotáhněte zápěstní a palcové pásky dle pořadí na obr. 2.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK